

➤ DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Prodotto	ADASPOR® PLUS PRONTO	BACT STR EXTRA	BACTYFOAM DF1
Produttore	Cantel Medical srl	Alpro Medical	Polo srl
Principio attivo	Isazone®, acido peracetico	Alchilamina terziaria, trialchiletoxylammonio propionato	Didecildimetilammonio cloruro, clorexidina digluconato
Tipo di formulato prima della preparazione	Liquido pronto all'uso	•	Liquido pronto all'uso
Campo d'impiego	Sterilizzante per dispositivi medici ospedalieri ed odontoiatrici, conforme alla EN 14937 e testato in condizione di sporco e pulito secondo la EN 14885	Disinfezione e pulizia di tutto lo strumentario	Schiuma disinfettante e detergente pronta all'uso per dispositivi medici, apparecchiature biomedicali e superfici delicate
Incompatibilità chimico-fisiche	Non mischiare con altri prodotti chimici	Nessuna	Tensioattivi anionici
Efficacia biocida	Virucida, Battericida, Fungicida, Micobattericida, Sporicida	Battericida, Fungicida, Virucida	Battericida e Fungicida (lieviticida), Tubercolicida, Virucida
Utilizzabile con ultrasuoni	No	Sì	No
Presenza di coloranti	No	Sì	No
Fattori interferenti	No	No	•
Modalità di impiego	Versare la soluzione A e la soluzione B in un contenitore ed immergere lo strumentario	Bagno per strumenti: soluzione all'1% Tempo di contatto: 60 min, Ultrasuoni: soluzione al 2% per 5 min	Pronto all'uso, vaporizzare direttamente sulla superficie da trattare o indirettamente su un panno pulito e asciutto e applicare sulla superficie. Far asciugare. Non risciacquare
Stabilità della soluzione diluita	12 giorni dall'attivazione	Concentrato liquido 36 mesi, soluzione in uso 1 settimana, soluzione pronta per l'uso (inutilizzata) 4 settimane	•
Modalità di conservazione	In luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore	5-30 °C	Conservare ben chiuso a temperatura ambiente
Indicazioni per lo smaltimento	Rifiuti speciali o rete fognaria secondo normativa vigente	Non disperdere nelle fognature o nelle acque	Come direttiva 2008/98/CE
Proprietà tossicologiche	Non tossico. Non ingerire ed evitare il contatto prolungato	Nocivo in caso di ingestione, corrosivo	•
Confezionamento	Flacone da 1.000 ml	Flacone da 1 litro	Flacone da 750 ml con tappo a vite ed erogatore manuale spray formaschiuma
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	No	No	No
Controllo qualità. Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	Sì	Sì	Sì
Prezzo di listino*	Euro 48,00	Non fornito	Euro 9,80
Info azienda	Tel. 06.9145399 www.cantelmedical.it	www.alpro-medical.de Distributore: 4t Quattrotti Tel. 02.96409029 www.quattrotti.com	www.medicalsafe.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	BENZOXID 10 INSTRUMENT	CIDEX OPA	DC1 KOMET	FAST & STERIL 3
	Intermedical	Advance Sterilization Products - J&J	Alpro Medical	Magnolia - Cattani Group
	Benzalconio cloruro, O-fenilfenolo	Orto-Ftalaldeide	Alchilamina e biguanide	Acido peracetico
	Liquido concentrato	Liquido pronto all'uso	•	•
	Detergente e disinfettante dello strumentario chirurgico e dispositivi medici invasivi	Pronto all'uso	Acciaio inox, carburo di tungsteno, diamantate, gommini	Sterilizzazione a freddo per strumenti odontoiatrici in tutti i materiali
	Detergenti anionici	Materiali da evitare: acidi forti, alcalini, agenti riducenti, materiali ossidanti. Materiali che reagiscono all'acqua	Nessuna	Non utilizzare in miscela con altri prodotti
	Virucida, Battericida, Fungicida, Micobattericida	Virucida, Battericida, Fungicida, Micobattericida, Sporidica	Virucida, Battericida, Fungicida	Virucida, Battericida, Fungicida, Tubercolicida, Sporidica
	Si	No	Si	Si
	No	No	Si	No
	Nessuno	Evitare le alte temperature (stabilità ridotta). Conservare a temperature inferiori a 50°C	No	Si
	Diluizione al 5% e all'1%; 5 min al 5% per virus e funghi; 3 min al 5% per micobatterio tubercolare e batteri	Pronto all'uso attivo in 5 minuti	1% per 60 min/2% per 30 min/3% per 15 min.i	Versare l'intero contenuto delle 3 bustine A, B e C in 2,5 lt di acqua, dopo 15 min la soluzione è pronta all'uso; immergere gli strumenti per 15 min
	7 giorni	Stabile in condizioni normali	Concentrato liquido 36 mesi, soluzione integra 4 settimane, soluzione in uso max. 1 settimana	36 ore
	Temperatura ambiente, flacone chiuso lontano da fonti di calore	La soluzione aperta e non utilizzata può essere conservata fino a 75 giorni	Chiudere ermeticamente con tappo a vite il flacone originale	In luogo fresco e asciutto
	Attraverso impianti biologici	Deve essere effettuata in conformità alla legge vigente e dopo ottenuto le necessarie autorizzazioni previste dalle leggi/nazionali/regionali	Biodegradabile. Non contiene né aldeidi né fenoli	Rifiuto speciale e va smaltito secondo la normativa vigente
	Provoca ustioni	Leggermente irritabile, il contatto ripetuto con la cute può provocare reazioni allergiche	Irritante su pelle e mucose	Vedi Scheda di Sicurezza
	1 litro	4 flaconi	Flacone dosatore da 1 litro	Confezione da 25 monodosi
	No	No	•	•
	Si	Si	•	•
	Euro 19,80	Euro 301,50 (confezione da 4 pezzi)	Euro 91,16 (1 litro)	Euro 105,00 confezione da 25 monodosi
	Tel. 0471.066088	Distributore Simit Dental Srl Tel. 0376.267811 www.simiddental.it	www.komet.it	www.cattani.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ DISINFETTANTI PER STRUMENTI

Prodotto	GREEN&CLEAN ID N	PERACETIC 10	PEROXILL 2000 LIQUIDO
Produttore	Metasys Medizintechnik	Intermedical Srl	LH Amedics Professional
Principio attivo	Composti d'ammonio quaternario, alchilamina, inibitori di corrosione	Percarbonato di sodio, tetraacetilendiammina	Acido peracetico
Tipo di formulato prima della preparazione	Liquido concentrato	In polvere	Liquido bicomponente
Campo d'impiego	Concentrato ad alta efficacia per la disinfezione di strumenti e frese	Sterilizzazione a freddo di strumenti medico-chirurgici, inclusi quelli che non possono essere sterilizzati in autoclave	Sterilizzazione chimica a freddo di strumenti chirurgici, utilizzo in termodisinfettori
Incompatibilità chimico-fisiche	Sì, non miscelare il prodotto con altre sostanze	Strumenti in lega di alluminio e nickel	Nessuna
Efficacia biocida	Virucida, Battericida, Fungicida, Micobattericida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida, sporicida	Virucida, Battericida, Fungicida, Micobattericida, Sporicida
Utilizzabile con ultrasuoni	Sì	Sì	Sì
Presenza di coloranti	Sì	No	No
Fattori interferenti	Sì, non miscelare con altre sostanze	Materiale biologico. È consigliabile eseguire il lavaggio degli strumenti prima di procedere alla sterilizzazione con Peracetic 10	No
Modalità di impiego	Per la disinfezione tubercolicida 1%, immersione per 1 ora, diluire con acqua, sciacquare gli strumenti dopo l'uso	Diluizioni utilizzate 1% e 3%; attivazione dopo 3/5 min dalla completa solubilizzazione in acqua a circa 35°C; tempo di contatto: 5 min al 3% per virus e funghi; 3 min per batteri e micobatteri tubercolari	Costituito da due soluzioni (A e B) che, miscelate, formano una soluzione sterilizzante
Stabilità della soluzione diluita	1 settimana	48 ore	14 giorni
Modalità di conservazione	•	Luogo fresco, lontano da fonti di calore in contenitore chiuso	Ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore
Indicazioni per lo smaltimento	Gli imballaggi non contaminanti e vuoti si possono riutilizzare. Rispettare la normativa vigente	Smaltibile attraverso impianti biologici. Le soluzioni esauste non sono considerate rifiuti pericolosi	Nel rispetto delle normative vigenti
Proprietà tossicologiche	Tossicità orale acuta >1000 mg/kg dosi efficace ATEmix calcolato: Specie: ratto	Irritante per le vie respiratorie, per occhi e pelle	Prodotto nocivo: non ingerire
Confezionamento	4 flaconi da 500 ml + dosatore/1 tanica da 5 lt/dosatore/rubinetto per tanica da 5 lt	1 Kg	1.000 ml di prodotto finito: soluzione A: 36 ml + soluzione B: 964 ml
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	No	No	No
Controllo qualità. Il prodotto è fabbricato rispettando le norme UNI EN ISO 9001 13485?	Sì	Sì	Sì
Prezzo di listino*	Euro 80,60 (tanica da 5 lt)	Euro 47,30	Euro 24,00 (1.000 ml)
Info azienda	Tel. 045.9814477 www.metasys.com	Tel. 0471.066088	Tel. 0532.978497 www.amedics.eu

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

	PROTEAZONE® OD	PROTEOSOL BLU	SPOREXIN® PLUS OD	ZEFIROL SF
	Cantel Medical srl	Fresissima	Cantel Medical srl	OCC
	Adazone®, ammonio quaternario, tensioattivi, 4 enzimi	Composizione evoluta di Alchilammine	Polifenoli e glutaraldeide a basse concentrazioni	Alchilamina, cloruro di ammonio, dimetilico diachilico
	Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido concentrato	Liquido concentrato
	Lavaggio, deterzione e disinfezione di strumenti, attrezzature e dispositivi medici in ambulatori odontoiatrici	Frese, gommini, strumentario	Sterilizzante a freddo per i dispositivi medici ed odontoiatrici	Pulizia e disinfezione strumenti e frese
	Non mischiare con altri prodotti chimici	Nessuna	Non mischiare con altri prodotti chimici	•
	Battericida, Fungicida, Virucida, Micobattericida	Virucida, Battericida, Fungicida	Virucida, battericida, fungicida, sporicida	Virucida, Battericida, Fungicida, Micobattericida
	Si	Si	No	Si
	Si	Si	No	No
	No	No	No	•
	Diluito 1,0 % per tempo di contatto di 10 min o al 2% per tempo di contatto di 5 min. Attivo a temperatura ambiente	Effetto rapido 4% per 15 min/Alto rendimento 1% per 60 min (Temp. max 45°)	10% in immersione per 10 minuti; 5% in immersione per 15 minuti, temperatura ambiente	Diluizione ed immersione seguendo i tempi e le modalità descritte
	Periodo di validità 36 mesi a confezione integra	4 settimane (non in uso)	30 giorni	Fino a 5 giorni in dipendenza della carica batterica, si consiglia ricambio quotidiano
	Temperatura ambiente, lontano da fonti di calore	Vedi scheda di sicurezza	Temperatura ambiente, lontano da fonti di calore	Temperatura ambiente
	Rifiuti speciali o rete fognaria secondo normativa vigente	Vedi scheda di sicurezza	Rifiuti speciali o rete fognaria secondo normativa vigente	Diluizione non serve nessuna modalità particolare. Non contiene aldeidi
	Non tossico	Evitare contatto con mucose	Non tossico	Non ingerire
	1.000 ml con annesso dosatore	1 lt con dosatore incorporato	Astuccio contenente 4 flaconi da 250 ml	Flacone da 2 lt
	No	No	No	•
	Si	Si	Si	Si
	Euro 87,00 per 1 lt di prodotto concentrato (0,87 soluzione diluita)	Non fornito	Euro 75,00	Non fornito
	Tel. 06.9145399 www.cantelmedical.it	Tel. 011.2217760 www.gruppodam.it	Tel. 06.9145399 www.cantelmedical.it	www.moltenidental.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA